

**ALLEGATO 5****PROTEZIONI**

**Guanti DPI** Dispositivo di Protezione Individuale a guanto in vinile, lattice o nitrile, monouso, dotato di marcatura CE e in dotazione nei plessi dell'Istituto. Le misure di igiene delle mani sono preferibili all'uso dei guanti, dato che non è garantito che la loro superficie esterna, potenzialmente contaminata, non sia portata a contatto con occhi, bocca e naso da chi li indossa. I guanti restano però una misura efficace nel caso di soggetti che abbiano frequenti contatti manuali con superfici/oggetti potenzialmente contaminati tanto da rendere inapplicabile la continua ripetizione del lavaggio delle mani, come ad esempio le attività di pulizia dei collaboratori scolastici.

**Mascherina chirurgica** maschera per ridurre l'aerosol respiratorio conforme alla norma EN 14683.

**Mascherina DPI** Dispositivo di Protezione Individuale a semi-maschera facciale filtrante tipo **FFP2** o **FFP3**, dotato di marcatura CE e conforme alla norma EN 149.

**Ogni tipo di mascherina** commercializzata come DPI (conforme alla norma EN 149 come le FFP3, FFP2, FFP1), ma anche le cosiddette **mascherine chirurgiche** (conformi alla norma EN 14683) o persino adeguate **mascherine facciali in tessuto autoprodotte** possono costituire - per **personale non sanitario** o comunque **non specificamente esposto** - un **adeguato filtro** alla diffusione delle goccioline d'acqua espirate che contengono il virus e sono piuttosto grossolane (il virus isolato di per sé - ma non è in questa modalità che si diffonde nell'ambiente - avrebbe invece dimensioni tali da essere filtrato sufficientemente solo da DPI di tipo FFP3, ma non FFP2 e FFP1). Le mascherine in tessuto hanno peraltro anche il vantaggio di poter essere facilmente lavate o disinfettate.

Il rispetto rigoroso delle misure di distanziamento, di igiene delle mani e del respiro e di aerazione rende non indispensabile l'uso di DPI. Tuttavia la possibilità di qualche mancanza nella loro applicazione, che è difficile escludere, o l'impossibilità di un'integrale applicazione, può imporre l'uso di adeguati DPI.

Le protezioni **vanno** indossate (come indicato di seguito) in caso di:

- ✓ **isolamento casi sospetti** (persone che presentano febbre o altri sintomi);
- ✓ **impossibilità a rispettare i distanziamenti** minimi di sicurezza;
- ✓ **accesso a un locale** che si presume "**sospetto**" per aerarlo;
- ✓ accompagnamento degli esterni negli edifici;
- ✓ presenza di più persone in un locale.

## **INDICAZIONI PER INDOSSARE LE PROTEZIONI**

**PRIMA DELL'USO** Prima di indossare qualsiasi DPI o protezione eseguire correttamente la procedura di *igiene delle mani*.

### **DPI per le vie respiratorie (MASCHERINA DPI)**

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione):

- ✓ posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l'alto;
- ✓ tirare l'elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
- ✓ tirare l'elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;
- ✓ modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su entrambi i lati dello stesso;

**PROVA DI TENUTA** Prima dell'uso verifica di aver indossato correttamente la maschera: metti il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inala e trattieni il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l'interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente.

**DURANTE L'USO** Evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.

**DOPO L'USO** Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla nuca.

Scartare le maschere **monouso** dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione.

Non riutilizzare mai le maschere monouso, non lavarle e non disinfettarle.

### **DPI delle mani (GUANTI DPI)**

**PROVA DI TENUTA** Verifica l'integrità del guanto: soffiare nel guanto per verificare che non sia bucato, nel caso sostituirlo ed effettuare nuovamente la verifica ora descritta

**DOPO L'USO** Scartare i guanti, le mascherine chirurgiche e le maschere DPI monouso e dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione.

**Ogni volta** che si tocca inavvertitamente un DPI o una maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.